

火を使わない お灸



Gebrauchsanweisung

Falsche Anwendung kann zu Problemen führen.

Falsche Anwendung kann zu Problemen führen. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und achten Sie auf die korrekte Anwendung. Bewahren Sie diese auch an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie bei Bedarf lesen können.




Sicherheitshinweise

- Hitzeerize sind für die Wirkung der Moxibustion unerlässlich. Wenn Sie während der Anwendung starke Hitze oder Unbehagen verspüren, entfernen Sie es bitte sofort. Beachten Sie, dass dies zu Verbrennungen führen kann.
- Bitte beachten Sie, dass die Wärmeempfindung je nach Körpertyp, Gesundheitszustand, Körperstelle, Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit variieren kann.
- Bei einigen Produkten können auch Unterschiede in der Wärme auftreten. Achten Sie auf Verbrennungen.
- Personen mit empfindlicher Haut oder zu Ausschlägen neigender Haut sollten ihren Hautzustand sorgfältig berücksichtigen, da es zu Verbrennungen kommen kann.

Wärmewirkung

1. Linderung von Müdigkeit
2. Förderung der Blutzirkulation
3. Linderung von Muskelermüdung
4. Linderung von Muskelsteifheit
5. Linderung von Neuralgie und Muskelschmerzen
6. Anregung der Magen-Darm-Funktion

Wärmeerzeugendes
Mittel (Eisenpulver)


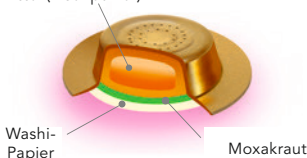


管理医療機器 温灸器
承認番号 15900BZZ01362000
再使用禁止(使い捨て)



Dauer ca. 3 Stunden, durchschnittliche Hautoberflächentemperatur ca. 40~50°C

Anwendung

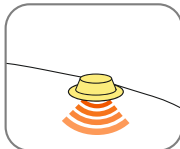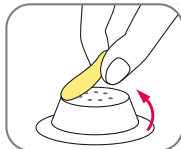

Nehmen Sie das Moxa-Punktpflaster aus der äußeren Verpackung, ziehen Sie die obere (konvexe) und die hautseitige (untere) Folie ab und kleben Sie es auf die betroffene Stelle.

- Das Produkt beginnt zu heizen, sobald der obere Verschluss geöffnet wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur einmal täglich an derselben Stelle.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht länger als 3 Stunden.

やさしい自然を人に、暮らしに。



<https://sennenq.co.jp>

製造 せんねん灸株式会社
販売元 セネファ株式会社
〒526-0244 滋賀県長浜市内保町77番地
TEL.0749-74-0556 FAX.0749-74-0336

0120-78-1009

受付時間 午前9:00~午後5:00(土・日・祝日休み)

Bitte unbedingt vor Gebrauch lesen

Achtung: Verbrennungen bei niedriger Temperaturen möglich

Personen, die dieses Produkt nicht verwenden sollen:

- Personen, die das Produkt nicht eigenständig entfernen können.
- Kleinkinder.

Bereiche, auf denen das Produkt nicht verwendet werden sollte:

- Gesicht
- Schleimhäute
- Ekzeme, Ausschläge, Wunden
- Akute Verletzungen

Dies ist ein Einweg-Produkt. Bitte nicht wiederverwenden.

使用上の注意

Wichtige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen

- Verwenden Sie auf diesem Produkt niemals Feuer.
- Kneten, schneiden, reißen oder befeuchten Sie dieses Produkt nicht vor der Anwendung.
- Die Wärmeentwicklung beginnt, wenn der obere Verschluss geöffnet wird. Nach dem Öffnen kann es nicht aufbewahrt werden. Nach Ablauf der Wärmedauer erzeugt es keine Wärme mehr.
- Vermeiden Sie die Anwendung unmittelbar vor oder nach dem Baden.
- Nicht im Schlaf verwenden.
- Nicht bei Fieber verwenden.
- Vermeiden Sie eine fortgesetzte Anwendung an derselben Stelle für mehr als 3 Stunden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Verbindung mit Heizgeräten wie Heizdecken, Wärmepads, elektrischen Decken, Fußbodenheizungen oder anderen Heizgeräten.
- Üben Sie keinen Druck auf das Produkt aus, indem Sie es mit Bettwäsche, Bandagen, Gürteln, Taschen usw. abdecken.
- Kleben Sie dieses Produkt nicht wiederholt auf dieselbe Stelle. Verwenden Sie es maximal einmal täglich an derselben Stelle. Besondere Vorsicht ist bei Erstanwendern und Personen mit empfindlicher Haut geboten, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Bei empfindlicher Haut oder Neigung zu Ausschlägen ist es wichtig, den Hautzustand sorgfältig zu berücksichtigen, da es zu Verbrennungen kommen kann.
- Wenn nach der Anwendung Verbrennungen auftreten, kann es zu Hautablösung kommen. Entfernen Sie das Produkt daher langsam.
- Seien Sie vorsichtig bei der Anwendung in Umgebungen, in denen Sie leicht schwitzen. Besondere Vorsicht ist bei hoher Temperatur und gleichzeitig hoher Luftfeuchtigkeit geboten.
- Wenn Sie starke Hitze oder Beschwerden wie Juckreiz verspüren, entfernen Sie es sofort.
- In Bereichen mit geringer Empfindlichkeit, wie z.B. am Gesäß, ist die Wahrscheinlichkeit von Verbrennungen besonders hoch, daher ist Vorsicht geboten.
- Entsorgen Sie das Produkt nach Gebrauch gemäß den Entsorgungsvorschriften Ihrer Gemeinde.

使用後は、お住まいの自治体の分別に従って廃棄してください。

Verbrennungen bei
niedriger Temperatur
treten häufiger auf bei:

Hohe Temperatur

Schwellungen

Hohe
Luftfeuchtigkeit

Starke Müdigkeit

Empfindliche Haut

Schwitzen

Lagerung

〈保管の条件〉

- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.